

# Damit unsere Kleinen auch im Winter frei atmen können

## Nami Cat

Süß von außen. Stark von innen.



Speziell für Kinder entwickeltes Inhalationsgerät

Hilft bei der Linderung von Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen und Bronchitis

Sanfte, aber effiziente Behandlung\*

## Erkältung lindern – **sanft und schnell dank Inhalation**

Insbesondere Kinder, aber auch viele Erwachsene leiden häufig unter Erkältungen oder anderen Atemwegserkrankungen. Das Inhalieren ist eine sanfte und wirksame Methode, die damit einhergehenden Symptome zu lindern. Über feine Tröpfchen transportieren Inhalatoren den Wirkstoff in die Atemwege, sorgen dafür, dass Schnupfen sich schneller löst und helfen beim Abhusten.


### **Was ist eine Erkältung?**

Eine Erkältung ist eine Erkrankung der Atemwege, die durch Viren ausgelöst wird. Zu den typischen Symptomen zählen Niesen, eine verstopfte oder laufende Nase, Husten, Halsschmerzen, leichtes Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Bei Kindern verursachen diese Symptome oft Schlafstörungen und Appetitlosigkeit, eine Belastung für die ganze Familie.

**In der Regel zeigen sich die ersten Symptome bei Babys und Kindern  
ca. 1 - 3 Tage nach der Ansteckung.**

### **Babys und Kinder sind besonders betroffen!**

Im ersten Lebensjahr erkranken Babys bis zu 8 Mal an Erkältungen. Die Ursache liegt in dem noch nicht voll ausgebildeten Immunsystem, wodurch Babys für Viruserkrankungen besonders anfällig sind.

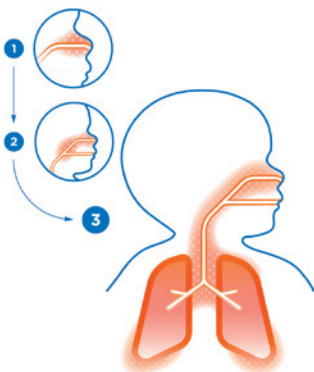

Das häufigste Symptom für virale Infektionen der oberen Atemwege bei Babys und Kleinkindern ist eine verstopfte Nase – und das ist oft die Ursache für die Entstehung von Infektionen der unteren Atemwege.

## Inhalieren hilft – je früher, desto besser!

- Die Symptome einer Erkältung werden gelindert und einer Verschlechterung des Gesundheitszustands wird bereits frühzeitig vorgebeugt
- Durch eine sorgfältige und sanfte Reinigung der Nase (z. B. durch den Einsatz einer Nasendusche) kann nicht nur verhindert werden, dass sich die Infektion in die unteren Atemwege verlagert, sondern auch die Effektivität der Inhalationstherapie gesteigert werden



## Warum ist eine Nasenreinigung wichtig?

- Das Infektionsrisiko wird durch das Entfernen von Bakterien und Viren verringert
- Höhere Effizienz von Nasenmedikamenten durch Schleimentfernung
- Trockenheit und Reizungen werden durch die Befeuchtung der Nasengänge reduziert
- Allergische Reaktionen werden durch das Ausspülen von Allergenen gelindert
- Verbessert die Atmung und damit das Wohlbefinden



## „Inhalieren ist wie Hände eincremen: Es schützt und pflegt unsere Schleimhäute“

Prof. Dr. Herth  
(Thoraxklinik Heidelberg)



## Tipps zum Inhalieren mit Kindern

- Ist Ihr Kind erkältet, sollte es dreimal täglich 5 bis 10 Minuten inhalieren.
- Nehmen Sie Ihr Kind hierfür am besten auf den Schoß oder setzen Sie sich daneben.
- Immer langsam und tief ein- und ausatmen.
- Kinder sollten mit Medikamenten oder Kochsalzlösung inhalieren.
- Inhalationsgeräte sind effektiv und schnell und funktionieren ohne gefährliches heißes Wasser.
- Lassen Sie Ihr Kind **NIE** unbeaufsichtigt inhalieren!

Na also,  
schon atmest du  
viel freier.  
Was für eine  
Erleichterung.



## OMRON Nami Cat – **Süß von außen. Stark von innen.**

Das Kompressor-Inhalationsgerät Nami Cat wurde in Zusammenarbeit mit Atmungstherapeuten speziell für Kinder entwickelt und bietet eine effiziente Behandlung von Erkältungen, Asthma, Bronchitis, Allergien und anderen Erkrankungen der unteren Atemwege.

**Mit einem kindergerechten Design und der kurzen Behandlungsdauer ist Nami Cat die perfekte Lösung für die Inhalationstherapie von Kindern zuhause.**



**Speziell für Kinder entwickelt**  
Kindergerechtes Design



**Medikamente werden effizient**  
in die unteren Atemwege transportiert



**Kurze Behandlungsdauer:**  
Ca. 7 Minuten bei 2,5 ml

**EASY Einfache Handhabung und Reinigung**

## OMRON Compact Plus – **2-in-1 Inhalationsgerät mit Nasendusche**

Mit dem OMRON Compact Plus können unterschiedliche Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege wie Erkältungen, Heuschnupfen, Asthma und Bronchitis effizient behandelt werden.

Insbesondere in der Erkältungszeit ist das Compact Plus ein starker Helfer für die ganze Familie. In Anwendung mit einer Kochsalzlösung hilft die Nasendusche, eine verstopfte Nase sanft zu befreien. Das Inhalationsgerät unterstützt die Behandlung der unteren Atemwege.



### **Die Nasendusche reinigt die Nasenhöhle**

Sie produziert einen sanften Nebel aus größeren Partikeln – optimal für die oberen Atemwege



### **Das Inhalationsgerät transportiert das Medikament effizient in die unteren Atemwege**



### **Kurze Behandlungsdauer:**

Ca. 7 Minuten bei 2,5 ml



### **Für Kinder und Erwachsene geeignet**

## OMRON MicroAIR U100 – **klein aber oho!**

Das OMRON MicroAIR U100 ist klein, leicht, leise – und damit jederzeit auch mobil einsetzbar.

Es ist nicht nur höchst effizient in der Behandlung von Erkrankungen der unteren Atemwege, sondern eignet sich dank seiner tragbaren, nahezu geräuschlosen Eigenschaften auch perfekt für die Behandlung von Kindern und Babys.



### **In allen Positionen einsetzbar, auch im Liegen**

Kinder können in ihrer Lieblingsposition entspannen



### **Tragbar**

Im Taschenformat und batteriebetrieben (2xAA)



### **Schnelle Behandlung und kurze Inhalationszeit**

Ca. 5 Minuten bei 2,5 ml



### **Nahezu geräuschlos (< 20 dB)**

Macht Kindern weniger Angst



### **Membrantechnologie für effiziente Wirkstofffreisetzung**

## Für jeden Patienten die richtige Lösung



### OMRON Nami Cat

Süß von außen – stark von innen  
Speziell für Kinder entwickelt

### OMRON MicroAIR U100

Mobil, nahezu geräuschlos und  
in jeder Position einsetzbar



### OMRON Compact Plus

2-in-1 Inhalationsgerät  
mit Nasendusche

## OMRON Inhalationstherapie **Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz**

- Absoluter Experte im Bereich Inhalation: weltweite Nr. 1\*
- Zuverlässige Qualität seit über 40 Jahren
- Alle OMRON Inhalationsgeräte sind voll erstattungsfähig ohne Aufzahlung
- Offizielles Mitglied im Förderverein der Deutschen Atemwegsliga e. V.

