



FUTURO™ HANDGELENK-SCHIENE

47853DABI, 47854DABI, 47855DABI

 MITTLERER
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

**Stabilisierung und Unterstützung
von schmerzenden, schwachen oder
verletzten Handgelenken.**

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Unterstützung bei häufig auftretenden
Verletzungen wie Verstauchungen, Zerrungen
und Symptomen des Karpaltunnelsyndroms*

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Auswechselbare Schiene für die linke oder rechte Hand.
- 2 Schlauchform mit drei Verschlüssen für passgenauen, individuellen Sitz.
- 3 Stütze der Handfläche bietet mittlere Stabilität.

GRÖSSE:



Artikelnummer	Größe	PZN	CM
47853DABI	S	04536401	12.7-15.9
47854DABI	M	04536418	15.9-19.0
47855DABI	L	04536430	19.0-22.9

Passend für das linke oder rechte Handgelenk.

Empfohlene Anwendung: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

*Zur Behandlung des Karpaltunnelsyndroms oder anderer schmerzhafter Handgelenksverletzungen empfehlen Ärzte oft eine steife Handgelenk-Schiene.

Zusammensetzung: Urethanschaum, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethankleber.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.


TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie die Verschlüsse. Stecken Sie die Hand in die Bandage und positionieren Sie die Metallschiene entlang der Handfläche.



Schließen Sie zuerst das mittlere Band und dann die Bänder daneben.

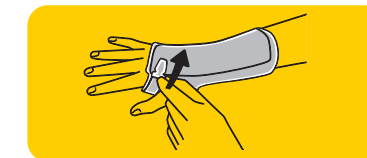

Befestigen Sie das Daumenband an der gegenüberliegenden Seite der Hand. Passen Sie alle Verschlüsse an, bis Sie ein straffes, aber bequemes Tragegefühl haben.



Für Linkshänder: Ziehen Sie die Schiene aus ihrem Fach. Halten Sie die Schiene gerade, drehen Sie die Bandage um 180 Grad und stecken Sie die Schiene in das Fach auf der anderen Seite. Schieben Sie auch das Ende der Schiene ganz hinein. Folgen Sie den Tragehinweisen weiter oben.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
www.futuro.de

